

# Eye Shield

## Disposable Lens (25)

**REF** Clear Lens #600-260   
Tinted Lens #600-261



Ortho Organizers, Inc.  
1822 Aston Avenue  
Carlsbad, CA 92008  
USA  
Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600  
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607

**EC REP**

**mdi Europa GmbH**  
Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen, Germany  
49 511 39 08 9530


1. Slide frame into inside holes on lens, rounded side down.

Faites glisser les branches de la monture dans les trous des lunettes situés le plus à l'intérieur, les bouts arrondis vers le bas.

Den Rahmen mit der runden Seite nach unten durch die innenliegenden Löcher an der Brille schieben.

Inserire la montatura nei fori mediali della lente, con la parte arrotondata rivolta verso il basso.

Deslice el marco, con los extremos redondeados hacia abajo, hasta que entre en las perforaciones interiores de la visera.

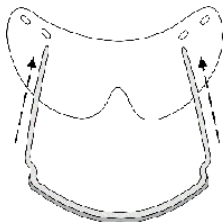


2. Slide frame into outside holes on lens.

Glissez maintenant les branches dans les trous extérieurs.

Den Rahmen durch die außenliegenden Löcher an der Brille hindurchschieben.

Far passare la montatura attraverso i fori laterali della lente.

Deslice el marco hasta que entre en las perforaciones exteriores de la visera.

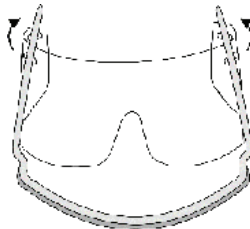


3. Slide lens into place at notch on frame.

Placez les lunettes dans les encoches de la monture.

Die Brille bis zu den beiden Einkerbungen am Rahmen vorschieben.

Far scorrere le aste fino ad impegnarle nell'incavo situato sulla montatura.

Deslice la visera hasta que quede colocada en la muesca del marco.

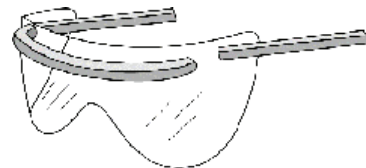

OMA Member  
Orthodontic Manufacturers  
Association

Made  
in the  
USA

600-250ENV

INS04A  
Rev B