

# Installation of Plier Grips


**REF 200-115**

Instructions for Use

## INSTALLATION OF PLIER GRIPS


Place grip in boiling water (at least 190°F) for 1 minute.

FIG. A

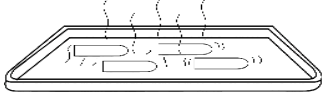


Spread and grip head of pliers, using a towel for cushion.

FIG. B

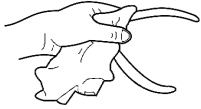

Remove grip from water with tweezers or forceps, drain water from grip then slide grip onto instrument handle.

FIG. C

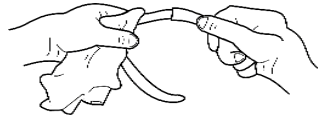


Repeat procedure for other handle.

## MONTAGE DES POIGNÉES D'UNE PINCE

Placez la pince dans de l'eau bouillante (au moins 88° C) pendant une minute.

FIG. A

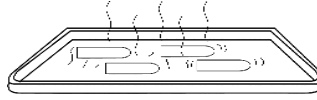


Ouvrez et saisissez avec un chiffon, la tête de la pince.

FIG. B



Retirez la poignée de l'eau avec des pincettes ou des pinces, égouttez la poignée, puis enfitez-la sur le manche de l'instrument.

FIG. C

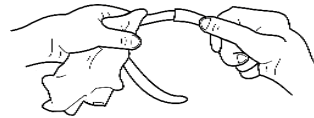


Répétez la procédure pour l'autre poignée.

## ANBRINGEN DER ZANGENGRIFFFÜBERZÜGE

Den Überzug mindestens 1 Minute lang in kochendes Wasser (mindestens 88°C) legen.

Abb. A

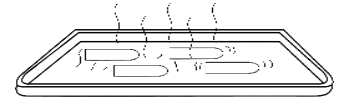


Die Zange öffnen, und den Kopf mit einem Handtuch als Polster halten.

Abb. B



Den Überzug mit einer Zange oder Pinzette aus dem Wasser nehmen, das Wasser abtropfen lassen, und den Überzug auf einen Handgriff des Instruments aufziehen.

Abb. C

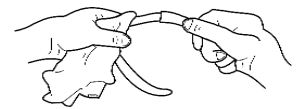


Den Vorgang mit dem anderen Handgriff wiederholen.

## MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA PER PINZA

Immergere l'impugnatura in acqua bollente (ad almeno 88°C) per 1 minuto.

FIG. A

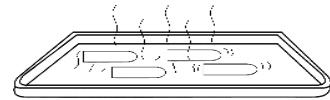


Allargare le branche afferrando la testa della pinza con una salvietta.

FIG. B



Con delle pinze, rimuovere l'impugnatura dal bagno d'acqua, farla sgocciolare e inserirla su una delle branche della pinza.

FIG. C

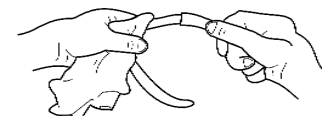

Ripetere la procedura per l'altra branca.

## INSTALACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS DE SUJECIÓN PARA LAS ASAS DEL ALICATE

Coloque los recubrimientos de las asas en agua hirviendo (a una temperatura de 88°C como mínimo) durante 1 minuto.

FIG. A




Abra los brazos del alicate utilizando una toalla a manera de almohadilla.

FIG. B



Retire un recubrimiento del agua con unas pinzas o fórceps, escurra el agua y deslícelo sobre el brazo del asa del alicate.

FIG. C

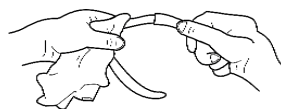

Repita el procedimiento para el otro brazo.



Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.  
1822 Aston Avenue  
Carlsbad, CA 92008  
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600  
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607  
USASales@OrthoOrganizers.com  
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers' Web site at*  
**OrthoOrganizers.com**



**mdi Europa GmbH**

Langenhagener Str. 71  
30855 Langenhagen, Germany  
49 511 39 08 9530



Certificate  
#FM 35078



OMA Member  
Orthodontic Manufacturers  
Association

Made  
in the  
USA

INS11A  
Rev B